


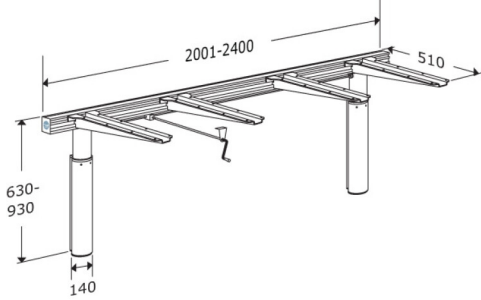

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar RK1113
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>EAN: 5708590292786 HMI: 54802</p>  <p>Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten.</p> <p>Manuelle Hubeinheit für Arbeitsplatte mit Handkurbel Inkl. 4 Träger Länge 2001-2400 mm. 300 mm höhenverstellbar. Montageschrauben für massives Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Gewünschte Länge der Hubeinheit bitte bei Auftragserteilung angeben</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhenverstellbar Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt.
<b>Materialien</b>  <b>Ergonomie</b>	<p>Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Handkurbel: Stahl Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006)</p> <p>Arbeitsplatten, die mit Hilfe einer Handkurbel in der Höhe verstellbar sind, sind eine kostengünstige Lösung für Küchen, in denen sich sowohl stehende als auch sitzende Benutzer aufhalten. Sie werden vor allem in Küchen verwendet, in denen keine häufigen, täglichen Einstellungen vorgenommen werden müssen.</p>



<b>Produkt</b>	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1113
<b>Funktionen</b>	<p>Manuelle Hubeinheiten werden mit Hilfe einer Handkurbel höhenverstellt. Sie sind für Arbeitsplatten mit und ohne Zarge verwendbar. Der Anschluss für die Handkurbel kann je nach Wunsch an der Vorderseite angebracht werden, jedoch nicht unter dem Spülbecken oder unter Kochplatten. Manuelle Hubeinheiten sind um 300 mm in der Höhe verstellbar. Die Hubeinheiten sind für Arbeitsplatten in willkürlichen Längen von 600 mm bis zu 3000 mm erhältlich.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>



<b>Produkt</b>	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1113
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> <p>Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.</p>

**WEEE**



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1113

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®