




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar RK1182
Produktbeskrivelse	<p>EAN: 5708590293813 HMI: 61271</p>  <p>Pressalit INDIVO løfteenheder kan nemt integreres i det private hjem, de sikrer at hele familien kan få glæde af, og udnytte køkkenets fulde potentiale med hjælp af den højdejusterbare funktion. Løfteenhederne kan også være med til at skabe en fleksibel køkkenløsning til f.eks. plejecentre, skolekøkkener og skolelaboratorier samt mange andre steder hvor der er behov for hyppige højdejusteringer af køkkenbordplader og skabe.</p> <p>Manuel løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 2001 - 2400 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt håndsving. Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Højderegulerbar Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

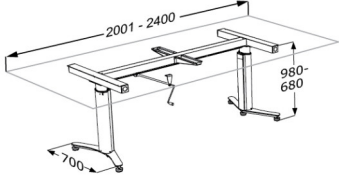

Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulérbar
Varenummer	RK1182
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



PRESSALIT®

Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar
Varenummer	RK1182

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®