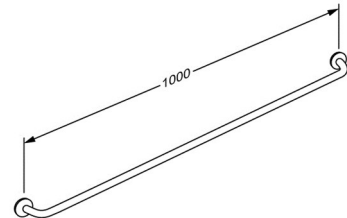




Produkt	PLUS Haltegriff 1000 mm
Produktnummer	RT104000 VVS:777565500 NRF:6191673 RSK:8980552 EAN:5708590145945 HMI: 19085 NBS:N13:436
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>PLUS Haltegriff, Durchmesser 33 mm, Länge 1000 mm, zur Festmontage. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen..</p> <p>Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt.</p> <p>Exkl. Wandbefestigungen.</p> <p>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p>
Höhenverstellung Produktkapazität	<p>Maximale Belastung: 235 kg.</p> <p>Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet.</p> <p><i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i></p>
Materialien Ergonomie	<p>Pulverbeschichtetes Aluminium</p> <p>Abdeckkappen aus Cycloy Kunststoff</p> <p>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.</p> <p>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.</p> <p>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>





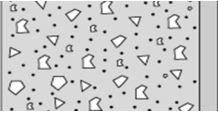

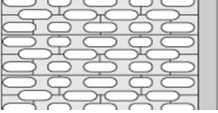
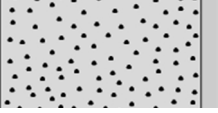
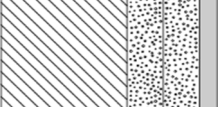
Produkt	PLUS Haltegriff 1000 mm
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist.</p>





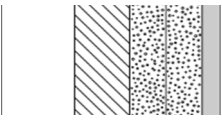
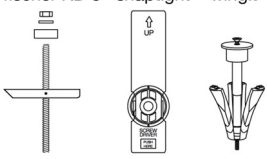
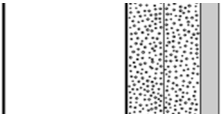
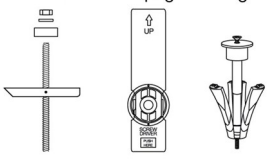
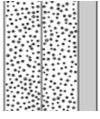

Produkt	PLUS Haltegriff 1000 mm
----------------	-------------------------

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.
	Vollziegel >= Mz12 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.
	Porenbeton P4 V8666 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.





Produkt	PLUS Haltegriff 1000 mm	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</p> <p>Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>	<p>fischer KD 8 snaptight wingit</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</p> <p>Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>	<p>fischer KD 8 snaptight wingit</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</p> <p>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.</p>	

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

