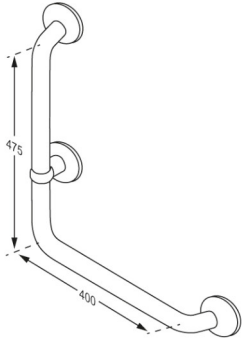




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 475 mm RT115035
Färg	VVS:777567135 NRF:6317174 EAN:5708590146287 HMI: 25432 NBS:N13:436 Röd (RAL 3003)
Beskrivning	 PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand. PLUS stödhandtag, vinkel 90° - vänster, diameter 33 mm, A:400 mm x B:475 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringsskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
Material Ergonomi	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast. Strop: Nylon (PA). Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp. Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

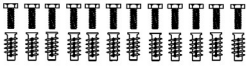
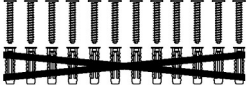
Product	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 475 mm
Varunummer	RT115035
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3449/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

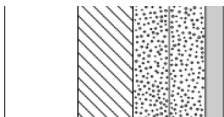
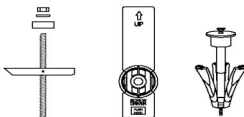
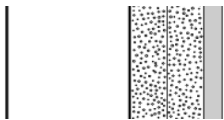
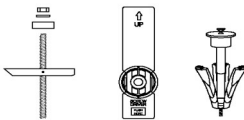
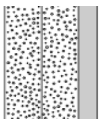
Product	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 475 mm
Varunummer	RT115035

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 475 mm RT115035
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

pressalit.com