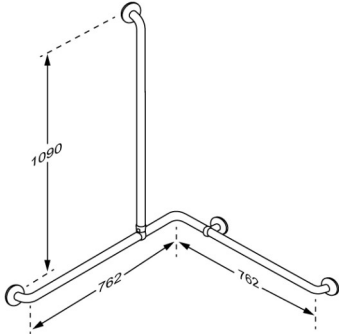




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS stödhandtag kombination, vändbart höger/vänster 762 x 762 x 1090 mm RT136108
Färg	VVS: 777568608 NRF: 6317188 EAN: 5708590154060 HMI: 25428 NBS: N13:436 Mörkblå (RAL 5011)
Beskrivning	 PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen i det funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand. PLUS stödhandtag kombination, 33 mm, vändbart höger/vänster, A: 762 mm x B: 762 mm x C: 1090 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.
Produktkapacitet	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
Material Ergonomi	Pulverlackerat aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA). Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp. Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

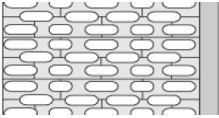
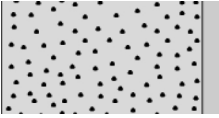
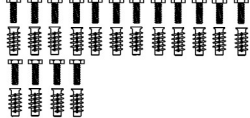
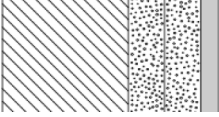
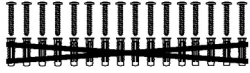
Product	PLUS stödhandtag kombination, vändbart höger/vänster 762 x 762 x 1090 mm
Varunummer	RT136108
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3451/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

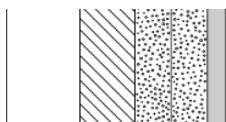
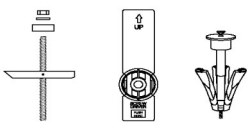
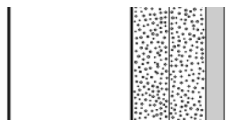
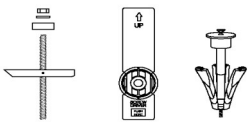
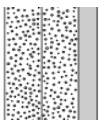
Product	PLUS stödhandtag kombination, vändbart höger/vänster 762 x 762 x 1090 mm
Varunummer	RT136108

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8618 - Monteringsset 16 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8618 - Monteringsset 16 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8618 - Monteringsset 16 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8668 - Monteringsset 16 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8618 - Monteringsset 16 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS stödhandtag kombination, vändbart höger/vänster 762 x 762 x 1090 mm RT136108
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (16 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (16 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®