



Produkt Produktnummer	PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm RT138035
Farbe	VVS:777568735 NRF:6317189 EAN:5708590146508 HMI: 25429 NBS:N13:436 Rot (RAL 3003)
Produkt- beschreibung	 PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegriffösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern. PLUS Eckhandlauf-Kombination, Durchmesser 33 mm, rechts/links drehbar, A: 762 mm x B: 1200 mm x C: 1090 mm, zur Festmontage. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen. Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Maximale Belastung: 235 kg. Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet. <i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i>
Materialien Ergonomie	Pulverbeschichtetes Aluminium Abdeckkappen aus Cycloy Kunststoff Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

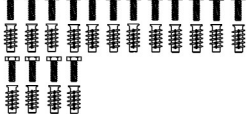
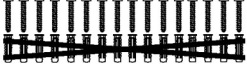


Produkt	PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm
Produktnummer	RT138035
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden. Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.
Konformitäts- erklärung	



Produkt	PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm
Produktnummer	RT138035

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8668 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm RT138035		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®