




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar med gascylinder R4650
	VVS: 654002100 NRF: 6132532 RSK: 7972590 EAN: 5708590309439 HMI: 71762 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473
	
Beskrivning	<p>PLUS upphängning till tvättställ med gascylinder, 300 mm steglös höjreglering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukshängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Till tvättställ på 16-22 kg. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ och inkl. monteringskruvar för massiv betong.</p>
Justerbar	Höjdregerbar
Höjjustering	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ 16-22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 57 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 20 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 153 kg belastar tvättstället.</i></p>

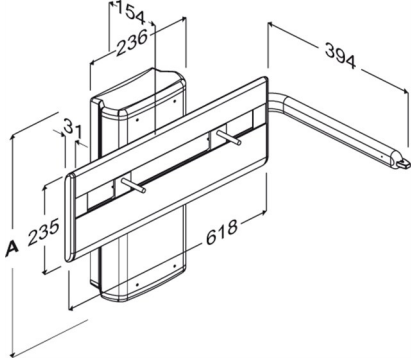



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar med gascylinder R4650
Garanti Rengöring	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®