


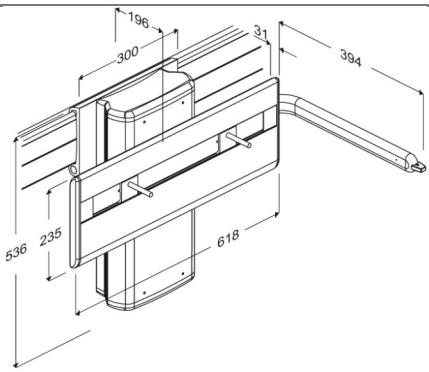

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, højderegulérbart med gascylinder og manuelt sideværts regulérbart R4680
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 654002200 NRF: 6132533 RSK: 7972591 EAN: 5708590309446 HMI: 71757 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng med gascylinder. Betjeningsgreb placeret ved front af håndvask. Betjeningsgrebet kan fungere som håndklædeholder, og kan placeres på højre eller venstre side af vasken. Manuelt højderegulérbart 300 mm (trinløst) samt sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	<p>Højde- og sideværts regulérbar 300 mm</p> <p>Maksimal belastning: 135 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 30 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 151 kg støtter sig til vasken.</b></p>



<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, højderegulérbart med gascylinder og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4680
<b>Materialer</b>	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS. Vaskophænget leveres med et betjeningsgreb, der består af en kontakt i ABS, der er placeret for enden af et fast greb i anodiseret aluminium.
<b>Ergonomi</b>	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af betjeningsgrebet. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjulpne bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
<b>Funktioner</b>	Betjeningsgreb er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder. Betjeningsgrebet er som standard placeret i højre side, men kan også placeres i venstre side. Vaskophænget leveres som standard med en gascylinder til vaske der vejer 16-22 kg, men kan leveres med andre belastningsmuligheder på forespørgsel.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, højderegulérbart med gascylinder og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4680
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overenstemmelses- erklæring</b>	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr</li><li>- Maskindirektivet 2006/42/EØF</li></ul>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, højderegulérbart med gascylinder og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4680

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®