




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder en handmatig zijwaarts verstelbaar R4680
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 654002200 NRF: 6132533 RSK: 7972591 EAN: 5708590309446 HMI: 71757 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473</p>  <p>PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS wastafel muurframe, met gasdrukcilinder bedienbare hendel welke is geplaatst aan de voorzijde van de wastafel. Handmatig (traploos) 300 mm in hoogte verstelbaar. De hendel kan ook worden gebruikt als handdoekhouder en kan aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoersysteem R2064/R2065/R2067. <b>Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</b> Materialen: Aluminium en ABS polymeer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. Voor montage op horizontale PLUS wandrails (niet inbegrepen!). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b>	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 300 mm



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder en handmatig zijwaarts verstelbaar R4680
<b>Product capaciteit</b>	<p>Maximale belasting: 135 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 135 kg, zal elke wandbevestiging met 30 kg zijn belast.</p> <p><i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i></p> <p><b>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 135 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 151 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</b></p>
<b>Materialen</b>  <b>Ergonomy</b>  <b>Functie</b>	<p>Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het muurframe is uitgevoerd met een handmatig bedienbare hendel bestaande uit een ABS polymeer schakelaar aan het uiteinde van een geanodiseerde aluminium arm</p> <p>De hoogte van de wastafel is eenvoudig aan te passen met behulp van de handmatig te bedienen hendel. Het wastafel muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken.</p> <p>De arm van de bedieningshendel kan als handdoekhouder fungeren. De bedieningshendel kan aan de rechter- of linkerzijde van de wastafel worden geplaatst. Dit wastafel muurframe wordt standaard geleverd met een gasdrukcilinder voor wastafels met een gewicht van 16-22 kg, maar is ook leverbaar voor wastafels met een gewicht van 8-12 kg of 12-16 kg.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

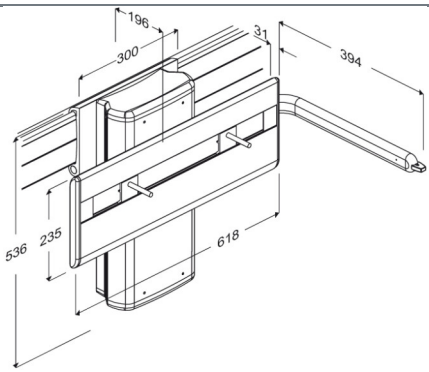

<b>Product</b>	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder en handmatig zijwaarts verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4680
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. "</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- Machinerichtlijn 2006/42/EEG</li></ul>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder en handmatig zijwaarts verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4680

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®