




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart R4781
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 654003220 NRF: 6132538 RSK: 7972596 EAN: 5708590309347 HMI: 71755 NBS: N13:30,335</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, eldrevet med håndbetjening, Elektrisk højderegulérbart 300 mm og sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højde- og sideværts regulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal belastning: 100 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 22 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 104 kg støtter sig til vasken.</b></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 23 mm/s
<b>Støjniveau</b>	45 dB

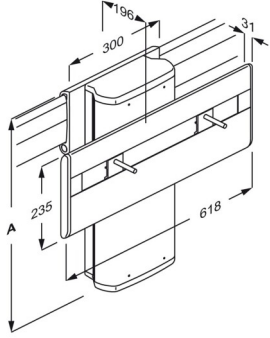

<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4781
<b>Materialer</b>	Vaskophængen er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.
<b>Ergonomi</b>	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af håndbetjeningen. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjulpne bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophængen passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
<b>Funktioner</b>	Håndbetjeningen leveres med vægbeslag.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
<b>Styreboks</b>	SMPS14002
<b>Håndbetjening</b>	HB3 (Linak) IPX6
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4781
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr</li><li>- Maskindirektivet 2006/42/EØF</li><li>- RoHS-direktivet 2011/65/EU.</li></ul>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4781

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®