



Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 1800 mm R9818112
Kleur	Antracietgrijs
Beschrijving	VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743  PLUS wandrail wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. PLUS wandrail, 1800mm voor horizontale montage. De wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels, en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigt de reiniging. Materialen: aluminium en polystyreen. Excl. bevestigingsmateriaal
Verstelbaarheid	Vaste montage
Product capaciteit	Maximale belasting: tot 1000 kg afhankelijk van het wandtype.
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De rail verdeelt het gewicht van het individuele badkamer product, bijvoorbeeld een wastafel muurframe, over de gehele lengte. De producten kunnen worden afgesteld en vergrendeld op de rail met intuïtieve vergrendelingsfuncties.
Funktie	De horizontale rail maakt het mogelijk om het product langs de muur te verplaatsen om de beschikbare ruimte in de badkamer constant te optimaliseren. De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

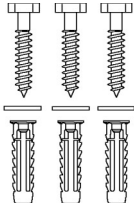
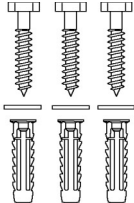
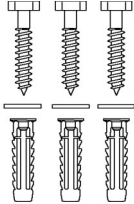
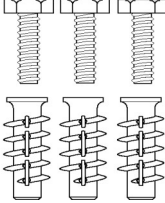
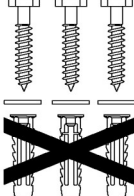
Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water. "
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in risico klasse I. Het product is toebehooren van medische hulpmiddelen, hoewel het zelf geen medisch hulpmiddel is, maar is om samen met een of meer specifieke medische hulpmiddelen te worden gebruikt om het met name mogelijk te maken dat de medische hulpmiddelen worden gebruikt overeenkomstig de beoogde doeleinden ervan.



PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8670 - Bevestigingsmateriaal, 3 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®