




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS väggskena, 3300 mm R9833112
Färg	VVS:615841133 NRF:7501066 EAN:5708590305912 HMI: 71749 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoförflyttning av dessa produkter. Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan. PLUS väggskena, 3300 mm, för vågrät montering. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.
Ergonomi Funktioner	Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov. Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

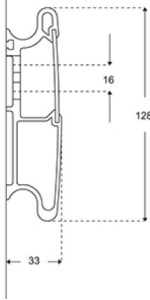

PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 3300 mm
Varunummer	R9833112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt opfylder alle relevante krav af F�rordning (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter i risk klasse I. Denne produkt �r tillbeh�r til en medicinteknisk produkt, da den i sig selv ikke �r en medicinteknisk produkt, men som �r avsedt til at anvendes sammen med flere bestemte medicintekniske produkter for at s�rskilt m�jligg�re anvendelsen af de medicintekniske produkter for deres avsedte �ndem�l. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf Denna produkt har f�tt f�ljande bed�mning: Byggvarubed�mningen: Accepteras

pressalit.com

PRESSALIT®