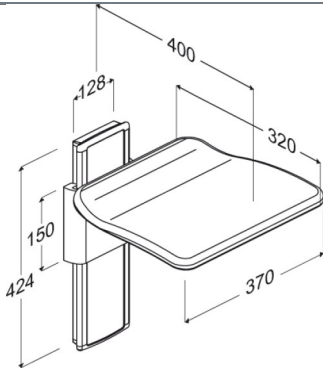




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112000
Farve	VVS: 777531200 NRF: 7501003 RSK: 7973927 EAN: 5708590306360 HMI: 130158 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Sædet er opklappeligt. Ekskl. monteringsbolte. Klapsædet bør ikke anvendes i bruseområdet. PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 240 mm Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringsskrue med 23 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer	Aluminium, hærdeplast og kunststof.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R5520112000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

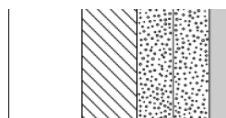
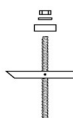
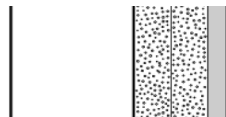
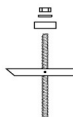
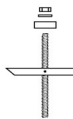
Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R5520112000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8660 - Monteringssæt, 8 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  	

pressalit.com