


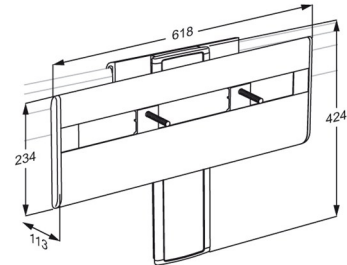

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580112 VVS:654001510 NRF:6132529 RSK:7972588 EAN:5708590309415 HMI: 71758 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473
<b>Farbe</b>	Anthrazitgrau
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>PLUS Waschtisch-Lifter. Um 240 mm höhenverstellbar mithilfe eines Hebels, seitlich verschiebbar. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. waagerechter PLUS Wandschiene.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhen- und seitlich verstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	240 mm
<b>Produktkapazität</b>	Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 200 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 135 kg.
<b>Materialien</b>	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.
<b>Ergonomie</b>	Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.
<b>Funktionen</b>	Wenn die Höhe des Waschtisches nur gelegentlich verändert werden soll, kann ein manuell verstellbarer Waschtisch-Lifter die richtige Lösung sein. Wichtig: Nicht für die tägliche Höhenverstellung geeignet. Für Anwendung, die eine tägliche Höhenverstellung fordert, wird die Variante mit Gasdruckzylinder R4680 oder die elektrische Variante R478x empfohlen.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.</p>



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®