


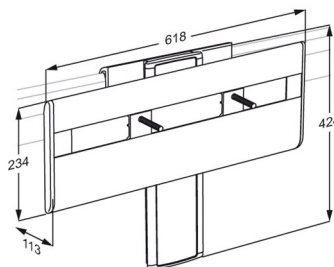

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuell höjdregerbar och sido reglerbar  R4580112
<b>Färg</b> <b>Beskrivning</b>	VVS: 654001510 NRF: 6132529 RSK: 7972588 EAN: 5708590309415 HMI: 71758 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  Antracitgrå  PLUS upphängning till tvättställ, manuell höjdregerbart 240 mm, antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjd- och sidoregerbar  240 mm  Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ 16-22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 30 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 20 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 153 kg belastar tvättstället.</i>
<b>Funktioner</b>	Viktigt ! Ej avsedd för daglig höjjustering. Vid daglig höjjustering rekommenderas gasdriven upphängning R4680 eller eldriven upphängning R478x.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.





# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS upphängning till tvättstall med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar och sido reglerbar
<b>Varunummer</b>	R4580112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Tvättspirit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®