




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement R7441182108
Couleur	Bleu foncé (RAL 5011)
Description	 PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier. Réglable en hauteur de 360 mm (assise), et réglable latéralement. Façade glissière-support verticale gris clair. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse). PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier. Réglable en hauteur de 360 mm (assise), et réglable latéralement. Façade glissière-support verticale gris clair. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse).
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Hauteur de réglage	360 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 23 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
Ergonomie	Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattable, le siège permet de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire.

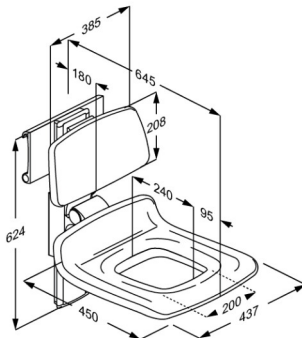

Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement
Numéro article	R7441182108
Fonctions	Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. Le siège de douche est facile à déplacer si un utilisateur souhaite prendre une douche debout.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.