



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm RT874108
Farve	VVS:777539108 NRF:6317198 EAN:5708590314204 HMI: 124195 NBS:N13:426 Mørkeblå (RAL 5011)
Produktbeskrivelse	 PLUS frontstøtter fås i tre forskellige længder og flere farver, de kan bruges enten som front- eller rygstøtte. PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm. Til PLUS brusesæde 450 og PLUS toiletstøtter.
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 70 kg.
Materialer Ergonomi Funktioner	Stål og plast Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance. For personer med fysiske handicap, især dem med begrænset overkropsstyrke/stabilitet, eller dem, der lider af ufrivillige bevægelser eller anfald, er der en meget reel risiko for at falde fremad, ned af toilettet. I modsætning til stropper og bæltter, der kan klemme og føles ubehagelige mod huden, fastgøres disse justerbare frontstøtter direkte mellem to PLUS toiletstøtter eller mellem armlænene på et PLUS-brusersæde. Hermed holdes brugerne sikkert og komfortabelt på plads, hvilket forbedrer deres sikkerhed og bevægelighed. Samtidig hjælper de plejerne med at holde på plads og giver øget tryghed.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm
Varenummer	RT874108
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.