



Produkt	PLUS Haltegriff 800 mm
Produktnummer	RT103112
Farbe	VVS:777565412 NRF:6311211 RSK:8980551 EAN:5708590318684 HMI: 19084 NBS:N13:436 Anthrazitgrau 
Produkt- beschreibung	PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegriffösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern. PLUS Haltegriff, Durchmesser 33 mm, Länge 800 mm, zur Festmontage. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen. Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Maximale Belastung: 235 kg. Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet. <i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i>
Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminium Abdeckkappen aus Cyclooy Kunststoff
Ergonomie	Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

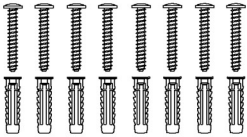
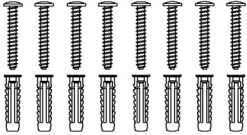
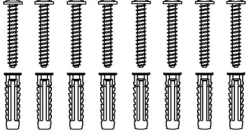
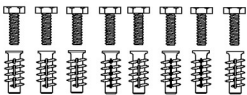
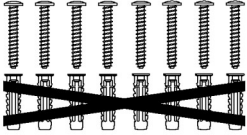
Produkt	PLUS Haltegriff 800 mm
Produktnummer	RT103112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden. Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.
Konformitäts- erklärung	



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Haltegriff 800 mm
Produktnummer	RT103112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8666 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8616 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Haltegriff 800 mm RT103112		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com