


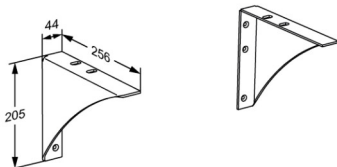

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX bæringer til håndvask, fastmonterede R2010182
Farve	VVS:636858800 NRF:6132553 EAN:5708590329338 HMI: 106241 NBS:N13:30,335 Lysegrå
Produktbeskrivelse	 MATRIX bæringer er den prisbillige løsning til MATRIX MEDIUM og ANGLE håndvaske. De fås i en fast monteret version, og i en manuelt højdejustérbar version som er velegnet hvor der ikke er brug for daglige højdejusteringer. Fastmonterede bæringer, sæt af 2 stk. Til MEDIUM og ANGLE håndvaske med integrerede håndgreb. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 75 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende , og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®





Produkt	MATRIX bæringer til håndvask, fastmonterede
Varenummer	R2010182
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.






PRESSALIT®

Produkt	MATRIX bæring til håndvask, fastmonterede
Varenummer	R2010182

Montering i forskellige vægtyper

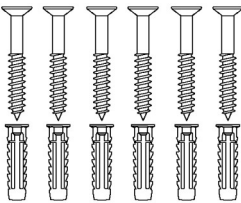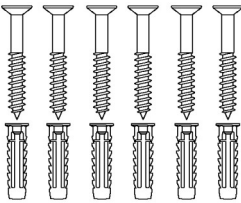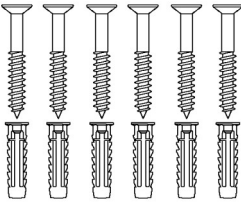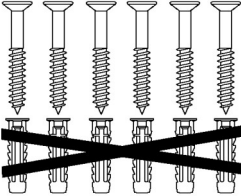	Beton >B25 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 Det anbefales ikke at montere dette produkt i gasbeton.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

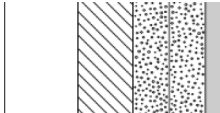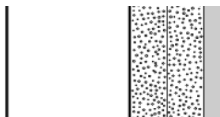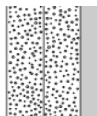

Produkt Varenummer	MATRIX bæringer til håndvask, fastmonterede R2010182	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstelse anvendes.