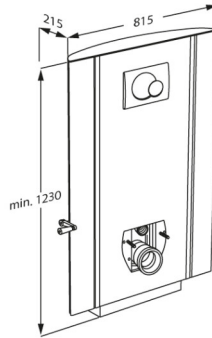




PRESSALIT®

Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie horizontale R8122112
Couleur	VVS:617990512 NRF:6191039 EAN:5708590345390 HMI: 105970 Gris anthracite 
Description	Notre ambition est de faciliter la vie quotidienne de l'utilisateur. De lui permettre d'aller aux toilettes de manière aussi aisée que possible. SELECT TL2 ensemble wc, réglable en hauteur manuellement de 300 mm par manivelle. Incluant réservoir encastré avec mécanisme de chasse à 3/6 l. Cuvette wc et abattant à commander séparément. Les glissières-support verticales intégrées permettent l'équipement de barres de relèvement PLUS. Sortie horizontale. Matériaux : aluminium anodisée et polystyrène (PS). Livré sans vis de montage.
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 300 mm Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Charge maximale : 235 kg (poids d'utilisateur + accessoires). Lorsque l'ensemble wc est chargé de 235 kg, chaque vis de montage est chargé de 65 kg. <i>Ce produit a été testé statiquement avec 600 kg, ce qui est exigé par les normes appliquées. Veuillez noter, que la plupart de wc compatibles avec ce produit, ont été testé jusqu'à 400 kg.</i>
Matériaux	Aluminium anodisé. Les plaque frontales sont en polystyrène. La plaque supérieure en stratifié compact. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1 et ISO 8191-2). Rapport de test disponible.</i>



PRESSALIT®

Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie horizontale R8122112
Ergonomie Fonctions	Décliné dans trois coloris assortis aux salles de bains modernes, l'ensemble WC contribue à une atmosphère agréable et raffinée. La réduction au minimum du nombre de rainures, de fentes et de cavités assure un nettoyage rapide et efficace tout en garantissant un design élégant et exclusif. Le WC est relevé et abaissé à l'aide de la manivelle. Celle-ci peut être indifféremment positionnée d'un côté ou de l'autre de l'ensemble WC – sans outil ! Au lieu de la manivelle, il est possible aussi de régler la hauteur de l'ensemble WC à l'aide d'une perceuse. Le WC peut être ajusté sur 300 mm, de 425 à 725 mm pour permettre sa parfaite adaptation aux aides techniques de l'utilisateur (telles qu'un fauteuil roulant).
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



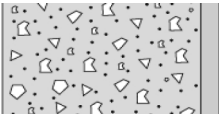
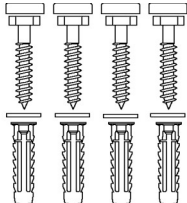
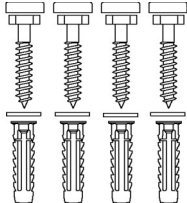
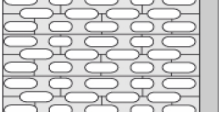
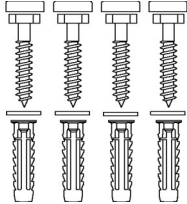
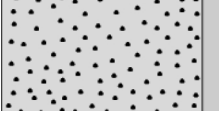
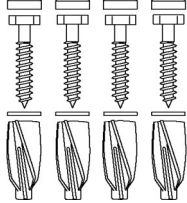
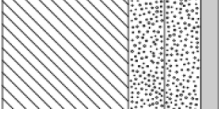
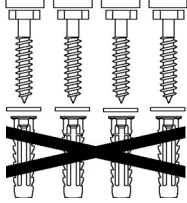
Article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie horizontale
Numéro article	R8122112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes
Déclaration de conformité	



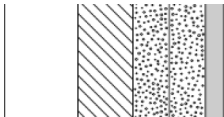
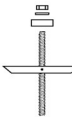
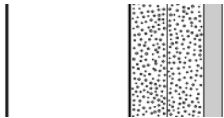
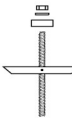
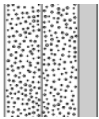
PRESSALIT®

Article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie horizontale
Numéro article	R8122112

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8655 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis blancs. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie horizontale R8122112		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.