


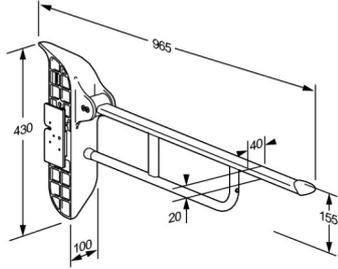

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, 850 mm R1081000
Farbe	VVS:615892102 NRF:6191054 EAN:5708590346847 HMI: 138190 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit ALBA-Flügel Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL3 und TL4 WC-Liftern entwickelt. Die elektrische Höhenverstellung des WC-Lifters ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich.</p> <p>VALUE Stützklappgriff, 850 mm, hochklappbar, höhenverstellbar 150 mm ohne Werkzeug (rechtsbedient). Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, Aluminiumdruckguss, Endkappen in Nylon (PA). Für die Nachmontage auf TL3/TL4 elektrischem/manuellem WC-Lifter, ALBA-Flügel Montageprofil mitgeliefert. Links vom Benutzer montiert.</p>
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 150 mm
Produktkapazität	Maximale belastbarkeit: 120 kg
Materialien	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan® (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Die Endkappen werden aus PA Nylon (teilkristalliner Thermoplast) mit herausragender Verschleißfestigkeit hergestellt und das Befestigungsprofil ALBA-Flügel besteht einem Aluminiumdruckguss.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
Produktnummer	R1081000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p>