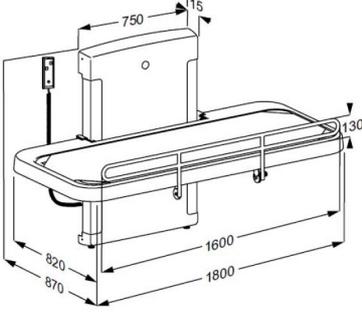




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SCT 2100 Duschiege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar R8582418000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS: 777544580 EAN: 5708590355832 HMI: 125449</p>  <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>SCT 2100 Duschiege mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Hochklappbar. Inkl. Seitengitter und Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf. Außenmaß 900 mm x 1800 mm. Materialien: Lackierter Stahl, Segeltuch und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	700 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximale Belastbarkeit: 175 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 175 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet. <i>Die Duschiege ist mit 440 kg statisch getestet, je nach den Anforderungen der verwendeten Hilfsnormen.</i>



<b>Produkt</b>	SCT 2100 Duschielie, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R8582418000
<b>Geräusch</b>	48 dB
<b>Materialien</b>	Lackierter Stahl, Segeltuchbespannung (PVC-beschichtet für zusätzliche Haltbarkeit) und polystyrol.
<b>Ergonomie</b>	Die Dusch- und Pflegeliege der Serie 2000 zeichnet sich durch eine sehr tiefe Verstellung bis Bodennähe aus, die dem Nutzer das Umsetzen erleichtert, und die Oberfläche der Pflegeliege besteht aus Segeltuchbespannung für einfache Reinigung. Die flexible Höhenanpassung der Liege bietet Nutzern und Helfern den Vorteil, Ihren täglichen Aufgaben bequem und komfortabel nachzukommen.
<b>Funktionen</b>	Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. Die Duschieliege kann an die Wand geklappt werden, sodass sie nur wenig Platz einnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. Kabelgebundene Fernbedienung: Die elektromotorische Höhenverstellung wird über die Fernbedienung gesteuert. Die Oberfläche vom Segeltuchbespannung kann einfach gereinigt werden und können auch abgenommen und separat gewaschen werden.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 70 W Stromverbrauch, standby: 2 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft platziert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer.

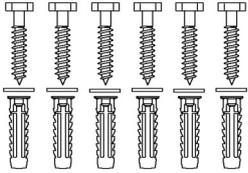
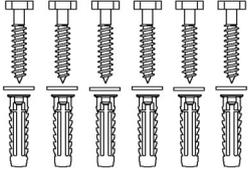
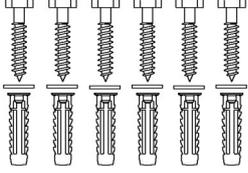
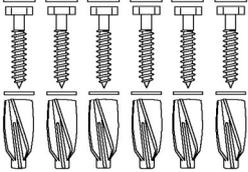
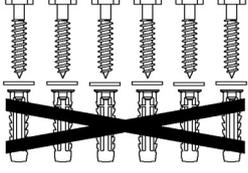


<b>Produkt</b>	SCT 2100 Duschiage, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R8582418000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt ist produziert worden gemäß:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte</li><li>- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</li><li>- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</li></ul>

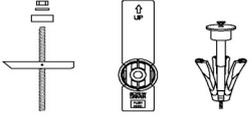
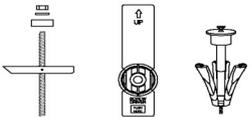


<b>Produkt</b>	SCT 2100 Duschiege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R8582418000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SCT 2100 Duschiege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar R8582418000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.