



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement R7424277
Couleur	NRF:6317118 EAN:5708590359694 HMI: 124341 FDA:INN/D135865 Citron vert
Description	 PLUS sièges de douche sont disponibles en différentes couleurs. Il y a l'option d'hauteur fixe, réglage électriquement ou réglage manuellement, assise évidée ou pas et avec ou sans dossier et accoudoirs. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit. PLUS siège de douche 450, rabattable, avec dossier. Réglable en hauteur de 380 mm (assise), sans outils. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Livré sans vis de montage. <i>Remplace R7420</i>
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 380 mm Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 24 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux Ergonomie	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattable, le siège permet de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire.



PRESSALIT®

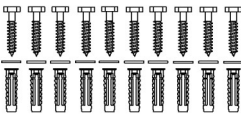
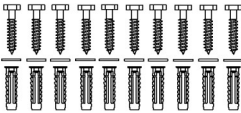
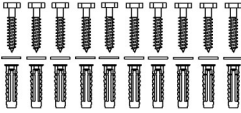
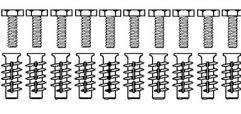
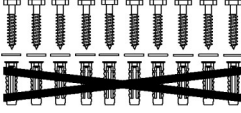
Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement R7424277
Fonctions	Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. Le siège de douche est facile à déplacer si un utilisateur souhaite prendre une douche debout.
Garantie Nettoyage	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. Déclaration de conformité Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



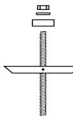
PRESSALIT®

Article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R7424277

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8662 - Kit vis de montage, 10 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement R7424277		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	