




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur électriquement R7635000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777517100 NRF: 6317151 EAN: 5708590360201 HMI: 124326  PLUS sièges de douche sont disponibles en différentes couleurs. Il y a l'option d'hauteur fixe, réglage électriquement ou réglage manuellement, assise évidée ou pas et avec ou sans dossier et accoudoirs. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-suppôts de Pressalit. PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier et accoudoirs. Réglable en hauteur de 500 mm (assise) à moteur électrique avec télécommande filaire. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. La surface antidérapante des accoudoirs est en SEBS doux. Livré sans vis de montage. <i>Remplace R7471</i>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	500 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (siège) : 150 kg. Charge maximale (accoudoirs) : 55 kg. Lorsque le siège est chargé de 150 kg, chaque vis de montage est chargée de 61 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testés statiquement avec un facteur de sécurité de 2,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 10 mm/s Vitesse en descendant: 10 mm/s
Niveau sonore	48 dB

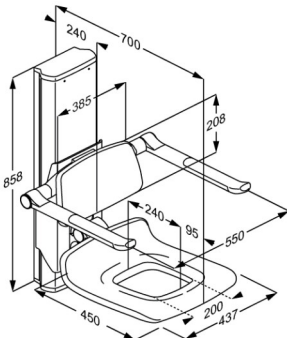

Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R7635000
Matériaux	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les accoudoirs sont principalement composés d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à leur extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. Les accoudoirs au niveau de l'articulation sont aussi recouverts de SEBS doux. Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
Ergonomie	Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattables, le siège et les accoudoirs permettent de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire. Avec son moteur électrique et sa télécommande, il est possible d'ajuster la hauteur de l'assise du siège de douche même si l'utilisateur est assis dessus.
Fonctions	L'extrémité des accoudoirs est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève et procure aussi à l'utilisateur une sensation précise de la limite de l'appui. Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. La télécommande filaire est livrée avec un support pour montage sur le mur.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Boîte de contrôle	SMPS14 (Linak) IPX6
Télécommande filaire	HB3 (Linak) IP66
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 60 W Consommation d'électricité en veille: 0,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®






Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R7635000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - la directive 2011/65/UE sur RoHS.








PRESSALIT®

Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R7635000

Installation dans de différents types de mur

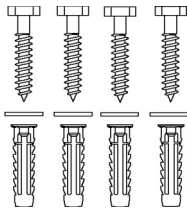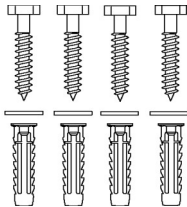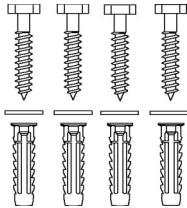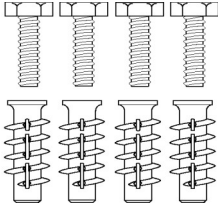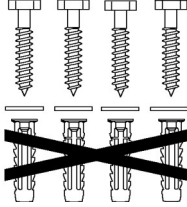	Béton >B25 V8603 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8603 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8603 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8653 - Kit vis de montage, 4 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8603 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	

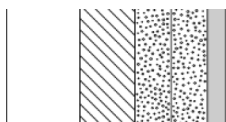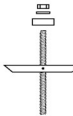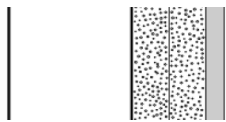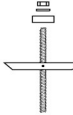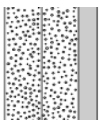

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur électriquement R7635000
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.   
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.   
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. 