




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart R7665112
Farve	VVS: 777517512 NRF: 6317159 EAN: 5708590360362 HMI: 124230 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. Eldrebet PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm og manuelt sideværts regulérbart, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar 500 mm Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 35 kg.
Hastighed opad Støjniveau	<i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i> Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s 48 dB

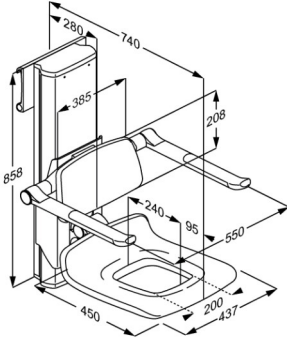

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7665112
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Ergonomi	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
Funktioner	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikesystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug. Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet. Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Styreboks	SMPS14 (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak) IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7665112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overensstemmelses-erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7665112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®