




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS ryglæn til fastmontering R6304108
Farve	NRF:6317027 EAN:5708590365329 HMI: 124221 Mørkeblå (RAL 5011) 
Produktbeskrivelse	PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere. PLUS ryglæn, 293 x 186 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på væg bag et væghængt toilet uden cisterne. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 59 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> <i>Ryglæn er ikke personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.</i>
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Funktioner	Til toilet uden cisterne
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

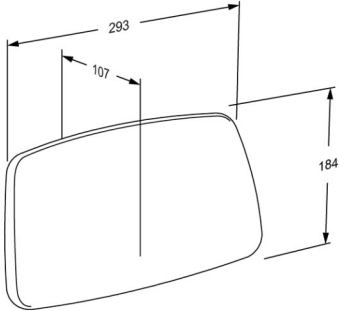

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6304108
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. Forventet levetid: 10 år. Kontraindikationer for brug: Det anbefales ikke at personer, der har brug for at ligge ned ved toiletbesøg, forsøger at bruge ryglænet til at støtte sig ved.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6304108

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®