


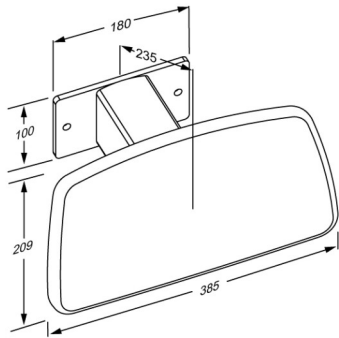

Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne zur Festmontage R6404000
Farbe	VVS: 777530200 NRF: 6317031 EAN: 5708590365350 HMI: 124215 Weiß
Produkt- beschreibung	 PLUS Rückenlehnen werden in verschiedenen Farben und Versionen angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe als auch verstellbar erhältlich. Sie eignen sich zur Wandmontage hinter einer Toilette ohne Spülkasten oder zur Montage an einem der Pressalit WC-Lifter SELECT. PLUS Rückenlehne, 385 x 209 mm, gepolstert. Feste Höhe, zur Montage direkt an der Wand hinter einer verlängerten Wand-WC ohne Spülkasten. Material: Aluminium und PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: 50 kg. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Bei einer Belastung mit 50 kg, trägt jede Befestigungsschraube 118 kg. <i>Rückenlehnen müssen in der Lage sein, das Gewicht der Person zu tragen, die sich dagegen lehnt. Die Rückenlehne soll nicht das gesamte Körpergewicht einer Person tragen. Eine für die Rückenlehne geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung bei 50% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 50 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 100 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
Ergonomie	Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an.
Funktionen	Der Rückenlehne kann mit hochhängendem Spülkasten verwendet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne zur Festmontage
Produktnummer	R6404000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne zur Festmontage
Produktnummer	R6404000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®