



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS ryglæn til fastmontering R6408000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777530300 NRF: 6317036 EAN: 5708590365411 HMI: 124218  PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere. PLUS ryglæn, 385 x 209 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på SELECT TL1, TL2, TL3 eller TL4 toiletløfter. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Monteringskit til montering på toiletløfter medfølger.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 118 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> Ryglæn er ikke personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6408000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en antibakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

pressalit.com

PRESSALIT®