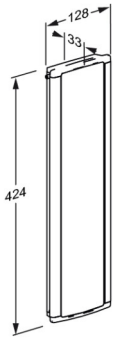




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering R9874112
Färg	VVS:615843104 NRF:7501073 EAN:5708590365961 HMI: 124108 Antracitgrå
Beskrivning	 Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan. PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering. Till höjddreglerbara, högerhandsmanövrerade toalettarmstöd, klapsitsar och duschsitsar utan rygg- och armstöd. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringsskruvar.
Justerbar	Fast höjd
Material	Aluminium och polystyren plast.
Ergonomi	Den lodräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna på höjden. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.
Funktioner	Om den vågräta skenan och den lodräta skenan kombineras kan utrymmet i badrummet utnyttjas optimalt till fördel för både brukare och vårdgivare.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

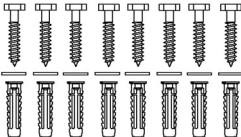
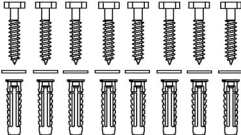
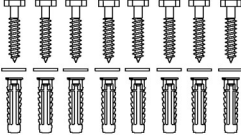
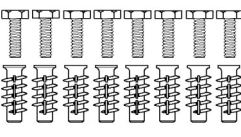
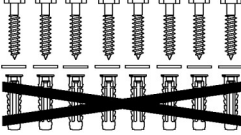
Product Varunummer	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering R9874112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt är tillbehör till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte är en medicinteknisk produkt, men som är avsedd att användas tillsammans med flera bestämda medicintekniska produkter för att särskilt möjliggöra användningen av de medicintekniska produkterna för deras avsedda ändamål.



PRESSALIT®

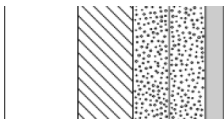
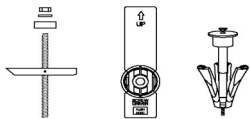
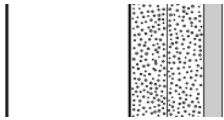
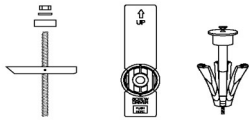
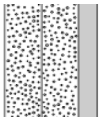
Product	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering
Varunummer	R9874112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering R9874112
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®