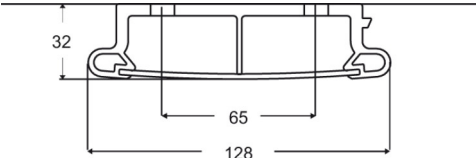




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen R9876112
Kleur	VVS: 615843106 NRF: 7501074 EAN: 5708590365978 HMI: 124192 Antracietgrijs
Beschrijving	 Zie hieronder voor een selectie van producten voor montage aan de wandrail. PLUS wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 600 mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigt de reiniging. Materialen: Aluminium en polystyrene. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de wandrail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De verticale wandrail maakt hoogteverstelling van de verschillende producten mogelijk. In combinatie met het horizontale wandrail kan de beschikbare ruimte in de badkamer optimaal worden benut. In omgevingen met meerdere gebruikers maakt de verticale wandrail het mogelijk om de verschillende producten aan te passen naar de hoogte voor de individuele gebruiker.
Functie	De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

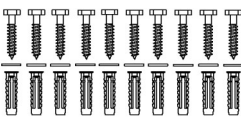
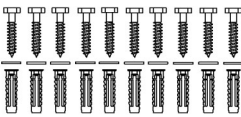
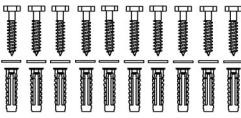
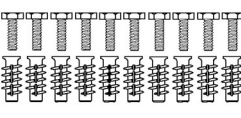
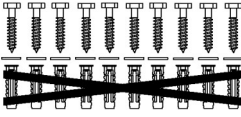
Product Artikelnummer	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen R9876112
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water. "
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in risico klasse I. Het product is toebehoren van medische hulpmiddelen, hoewel het zelf geen medisch hulpmiddel is, maar is om samen met een of meer specifieke medische hulpmiddelen te worden gebruikt om het met name mogelijk te maken dat de medische hulpmiddelen worden gebruikt overeenkomstig de beoogde doeleinden ervan.



PRESSALIT®

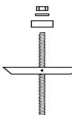
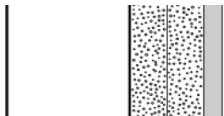
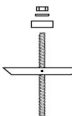
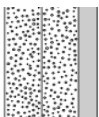
Product	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen
Artikelnummer	R9876112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8662 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen R9876112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com

PRESSALIT®