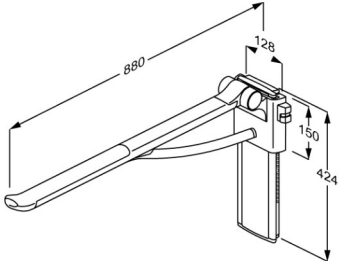




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad R370485000
Färg	VVS:615875500 NRF:6191095 RSK:8487446 EAN:5708590368214 HMI: 123500 FDA: ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. <i>Ersätter utgående modeller R3185 och RF185.</i> PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 880 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Höger hand manövrerad. Höjddreglerbart 240 mm. Avtagbart och uppfällbart. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Exkl. monteringskruvar.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 240 mm Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 50 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmsstöd, 850 mm, höger hand manövrerad R370485000
Ergonomi Funktioner	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmsstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmsstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettarmsstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmsstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmsstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

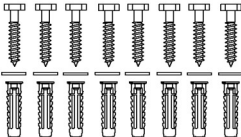
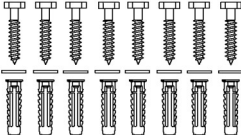
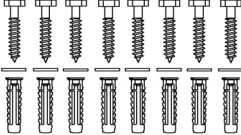
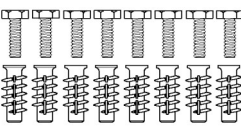
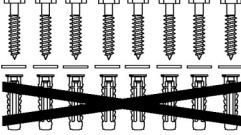
Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad R370485000
	Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol. Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i> För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads". Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4210/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

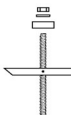
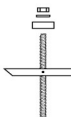
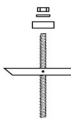
Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad R370485000			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			

pressalit.com

PRESSALIT®