



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening R370370108
Kleur	NRF:6191081 EAN:5708590368061 HMI: 125878 FDA: ILS/D135866 Donkerblauw (RAL 5011)
Beschrijving	 Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. Geschikt voor gebruik met closet welke een diepte vanaf de wand heeft van 540/550 mm. PLUS toiletsteun met veer. Totale lengte 730 mm, ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Linkshandige bediening. In hoogte 240 mm verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Opklapbaar en afneembaar. Antraciete afdekplaat voor verticale wandrails. Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel versterkte nylon kern Exclusief montageset.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 240 mm Maximale belasting: 150 kg. Wanneer de toiletsteun belast is met 150 kg, wordt elke wandbevestiging in de verticale wandrail belast met 41 kg. <i>PLUS toiletsteunen zijn statisch getest met 700 kg (dicht bij de muur), 425 kg (in het midden) en 225 kg (aan het uiteinde).</i>
Materialen	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening R370370108
Ergonomy Functie	De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen. Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. Opklapbaar tegen de muur. De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening
Artikelnummer	R370370108
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening
Artikelnummer	R370370108
	Beoogd gebruik De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel. Operationele omgeving Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i> Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".



PRESSALIT®

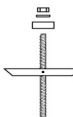
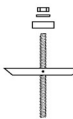
Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening
Artikelnummer	R370370108

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening R370370108		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		

pressalit.com