




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS barre de relèvement, 700 mm, réglage de la main droite R391470277
Couleur	NRF:6191171 EAN:5708590368986 HMI: 123659 FDA: ILS/D135866 Citron vert 
Description	Toutes les barres de relèvement PLUS sont équipées d'un système de contrepoids qui permet de maîtriser le déplacement de la barre entre les positions verticales et horizontales. Convient pour une utilisation avec cuvettes de toilettes d'une longueur de 700 mm ou pour les toilettes posées au sol. <i>Remplace les modèles R3560, RF560, R3570 et RF570 qui ne sont plus fabriqués.</i> <i>PLUS barre de relèvement avec ressort. Projection 770 mm. Design ergonomique qui offre à l'utilisateur un soutien confortable et reposant ainsi qu'une qualité d'appui optimale. Réglage de la main droite. Réglable en hauteur de 240 mm et réglable latéralement. Rabattable et amovible. Façade glissière-support verticale gris anthracite.</i> <i>Matériaux : aluminium avec une surface en matière synthétique antidérapante. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse).</i>
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur et latéralement 240 mm Charge maximale : 150 kg. Lorsque la barre est chargée de 150 kg, chaque vis de montage dans le glissière-support horizontal est chargé de 44 kg. <i>PLUS barres de relèvement ont été testé statiquement jusqu'au 700 kg (près du mur), 425 kg (au milieu) et 225 kg (à l'extrémité du barre).</i>
Materiaux	La barre de relèvement est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à l'extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. La barre de relèvement au niveau de l'articulation est aussi recouverte de SEBS doux. Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.

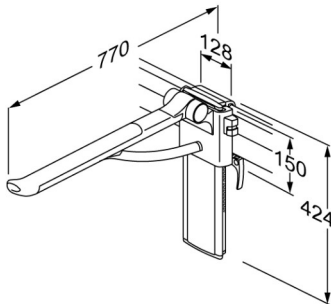

PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS barre de relèvement, 700 mm, réglage de la main droite R391470277
Ergonomie Fonctions	L'extrémité de la barre de relèvement est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève. En même temps, l'utilisateur a une sensation précise de la limite de l'appui. La surface antidérapante et agréable au toucher assure une bonne prise. La barre de relèvement est équipée d'une articulation qui permet de rabattre le bras contre le mur. De différents accessoires peuvent être montés en-dessous de la barre. La barre de relèvement peut être poussée le long de la glissière-support horizontale. La barre de relèvement est équipée d'un ressort d'amortissement. Le ressort permet de relever et de baisser la barre dans un mouvement fluide et progressif.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS barre de relèvement, 700 mm, réglage de la main droite
Numéro article	R391470277
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
Déclaration de conformité	



PRESSALIT®

Article	PLUS barre de relèvement, 700 mm, réglage de la main droite
Numéro article	R391470277
	Usage prévu La barre de relèvement sert de support à la personne au moment de s'asseoir et de se relever des toilettes ou lors de transfert depuis ou vers le fauteuil roulant. Environnement d'exploitation Pour un usage en intérieur dans un environnement humide tel qu'une salle de bain dans des logements privé, centres de soins et centres hospitaliers. Dans le cadre d'un usage institutionnel, la durée de vie prévue est de 10 ans. <i>Test de cycle de vie réalisé conformément à la norme ISO 17966:2016.</i> Pour l'entretien, veuillez voir le manuel d'utilisation et d'entretien, qui est fourni avec le produit et aussi téléchargeable sur le site web.

pressalit.com

PRESSALIT®