


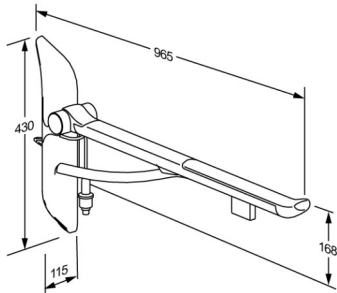

# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad<br>R372585112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Färg</b>                              | <p>VVS: 615878212<br/>NRF: 6191143<br/>EAN: 5708590368689<br/>HMI: 138174</p> <p>Antracitgrå</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beskrivning</b>                       | <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge.<br/>Kan endast användas med smal toalettlyftar. Passar en vägghängd toalett där avståndet från bakkanten till framsidan på toaletten är 700 mm.</p> <p>PLUS toalettarmstöd med manöverpanel och fjäderbelastning, 850 mm.<br/>Höjddreglerbart 150 mm. Uppfällbart. Vänster hand manövrerad<br/>Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig.<br/>Kan endast användas med TL3/TL4 toalettlyftar, med en toalett där avståndet från bakkanten till framsidan på toaletten är 540/550 mm.<br/>Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.<br/>Exkl. monteringskruvar.</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjdjustering</b> | <p>Höjddreglerbar</p> <p>150 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktkapacitet</b>                  | Maximal belastning: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material</b>                          | Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna.<br>Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergonomi</b>                          | Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel.<br>Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funktioner</b>                        | Toalettstödet undersida är utformad för montering av olika tillbehör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad<br><br>R372585112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garanti</b><br><br><b>Rengöring</b>   | <p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättssprit 70%<br/>Oxyplus-acid 2% (Diversey)<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>                              | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Överensstämmelses<br/>deklaration</b> | Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter<br>- RoHS-direktivet 2011/65/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Varunummer</b> | R372585112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <p><b>Avsedd användning</b><br/>Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b><br/>För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år.</p> <p><i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®