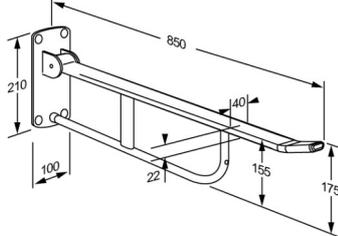




|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                      | VALUE II Stützklappgriff, Festmontage<br>R1109000   |
| <b>Farbe</b>  | VVS:615891100<br>NRF:6191057<br>RSK:8487434<br>EAN:5708590367576<br>HMI: 123560<br>Weiß   |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>                            |  <p>VALUE II Stützklappgriff, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet.<br/>Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> <p>VALUE II Stützklappgriff, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet.<br/>Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff.<br/>Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> |
| <b>Verstellung</b><br><b>Produktkapazität</b>               | Festmontage<br>Maximale Belastung: 120 kg.<br>Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 120 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 242 kg belastet.  |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b><br><b>Funktionen</b> | Hauptmaterial: Stahl<br>Oberfläche: Rilsan.<br>Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen.<br>Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.<br>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.  |
| <b>Garantie</b>   | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.   |

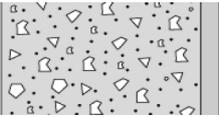
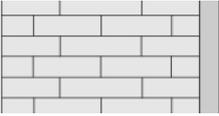
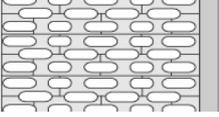
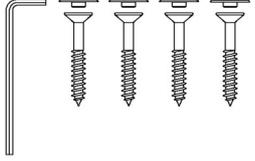
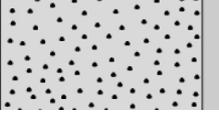
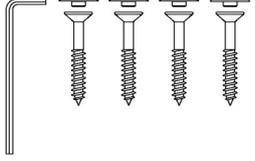
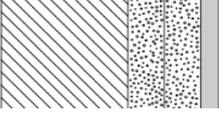
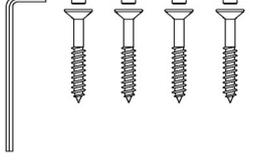


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>                     | VALUE II Stützklappgriff, Festmontage   |
| <b>Produktnummer</b>               | R1109000  |
| <b>Reinigung</b>                   | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes<br/>Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p> |
| <b>Konformitäts-<br/>erklärung</b> |   |

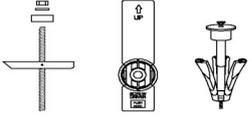
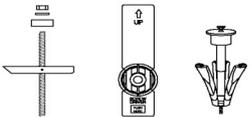


|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | VALUE II Stützklappgriff, Festmontage |
| <b>Produktnummer</b> | R1109000                              |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.   |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.   |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden. |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>  | VALUE II Stützklappgriff, Festmontage<br>R1109000   |   |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.        |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.  |  |

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.