




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5500112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	VVS: 777531712 NRF: 7501063 EAN: 5708590328249 HMI: 130162  PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Sædet er opklappeligt. Til eftermontering på lodret PLUS vægskinne (medfølger ikke). Klapsædet bør ikke anvendes i bruseområdet. PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Til eftermontering på lodret vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 240 mm Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

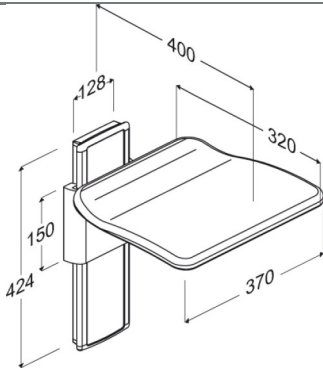

Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R5500112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R5500112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®