




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement R5500112
Couleur	Gris anthracite
Description	VVS:777531712 NRF:7501063 EAN:5708590328249 HMI: 130162  PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm. Le siège est rabattable. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse). Les strapontins ne sont pas pour usage dans la zone de douche. PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm. Matériaux : aluminium, résine thermodurcissable, matière synthétique. Pour équipement de PLUS glissière-support verticale (non comprise)
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 240 mm Poids maximum de l'utilisateur : 265 kg. Lorsque le siège est chargé de 265 kg, chaque vis de montage est chargé de 23 kg. <i>Les PLUS strapontin rabattable ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux Fonctions	Le strapontin est fait en résine thermodurcissable et en aluminium anodisé 10 microns. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. Le strapontin rabattable, avec son siège ergonomique, est idéal quand on a besoin d'une place assise supplémentaire dans un espace réduit. Il s'agit typiquement de pièces où l'on peut avoir besoin de se reposer, par exemple la cuisine, l'ascenseur, un long couloir ou le coin habillage/déshabillage de la salle de bains.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

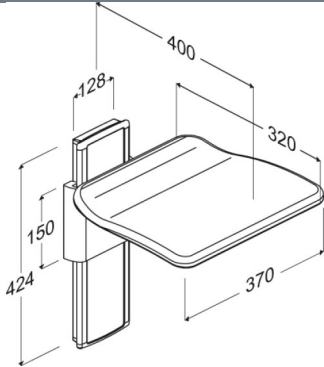

Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R5500112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
Déclaration de conformité	



PRESSALIT®

Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R5500112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®