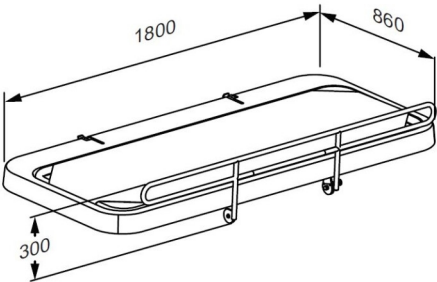




PRESSALIT®

Article Numéro article	SCT 2000 table de douche, toile maillée, montage fixe R8425218000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777543020 EAN: 5708590372167 HMI: 130360 FDA: INT/D124320  Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur. SCT 2000 table de douche, montage fixe, rabattable. Incluant barrière latérale, bac collecteur d'eau avec sortie intégrée. Cotes extérieures : 860 mm x 1800 mm. Matériaux : acier laqué par poudrage, toile maillée et polystyrène. Livré sans vis de montage.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 175 kg. Charge maximale (SWL) : 175 kg. Lorsque la table de douche est chargée de 175 kg, chaque vis de montage est chargé de 52 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 262,5 kg, car la norme ISO 17966 exige des tests avec un facteur de sécurité de 1,5.</i>
Matériaux	Acier laqué par poudrage, toile maillée (recouverte de PVC pour la durabilité) et polystyrène.



PRESSALIT®

Article Numéro article	SCT 2000 table de douche, toile maillée, montage fixe R8425218000
Ergonomie Fonctions	La série 2000 se caractérise par une hauteur initiale basse pour faciliter les transferts vers la table de douche. De plus, les modèles de cette possèdent un lit de toile perforée qui laisse s'écouler l'eau vers un bac récupérateur situé juste dessous. La flexibilité profite à la fois à l'utilisateur et à l'aide-soignant, car une hauteur de travail bien adaptée est aussi importante pour la sécurité de l'aide-soignant que le confort de l'utilisateur. Le bac collecteur d'eau muni d'une sortie d'eau intégrée protège le personnel soignant et le sol des éclaboussures. Le flexible rattaché au centre du bac récupérateur d'eau pourra être raccordé au système d'évacuation d'eau, mural ou au sol. La table de douche peut être rabattue à la vertical pour occuper le moins de place possible quand elle n'est pas utilisée. Les boutons-poussoirs rouges de la télécommande filaire indiquent clairement "montée" et "descente". La télécommande filaire est livrée avec un système de fixation murale. Munie d'une fermeture éclair, la toile se retire facilement quand il faut la laver ou la remplacer.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.



PRESSALIT®

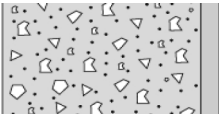
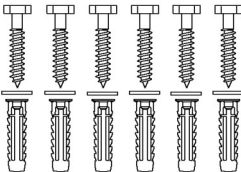
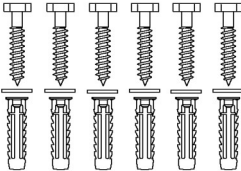
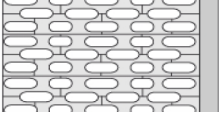
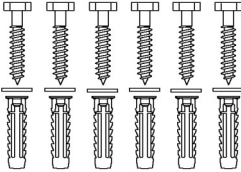
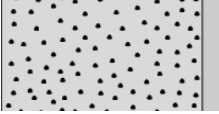
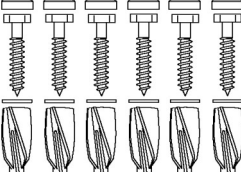
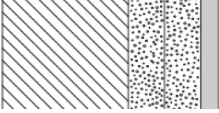
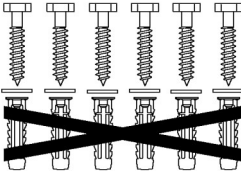
Article	SCT 2000 table de douche, toile maillée, montage fixe
Numéro article	R8425218000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



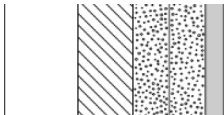
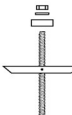
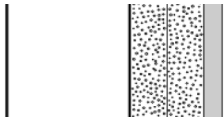
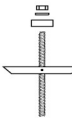
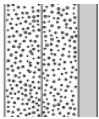
PRESSALIT®

Article	SCT 2000 table de douche, toile maillée, montage fixe
Numéro article	R8425218000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	SCT 2000 table de douche, toile maillée, montage fixe R8425218000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.