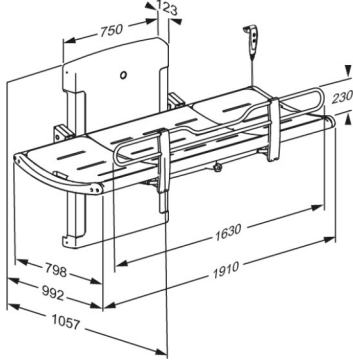




PRESSALIT®

Produkt	SCT 3000 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8582318299
	VVS: 777543498 EAN: 5708590374116 HMI: 130164
Farbe	Saphirblau (RAL 5003)
Produkt- beschreibung	 Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. Die Dusch- und Pflegeliege Serie SCT3000 verfügt über ein stilvolles und preisgekröntes Design, das auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. SCT 3000 Duschliege mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Hochklappbar. Inkl. Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf und Ablaufschlauch (Ø32 mm). Innenmaß 1800 mm, Außenmaß 1057 mm x 1910 mm. Materialien: Lackierter Stahl, Aluminium, weicher PUR-Schaum und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm



Produkt	SCT 3000 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8582318299
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 227 kg. Maximale Belastung (SWL): 237 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 227 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 29,5 kg belastet. <i>Die Pflegeliege ist mit 592,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 15 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 20 mm/s
Geräusch	48 dB
Materialien	Materialien: Aluminium, PUR-Schaum, Kunststoff, lackierter Stahl.
Ergonomie	• Die ergonomisch geformten Seitengitter haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschliege versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. • Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. • Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	• Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch (Ø32 mm) in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. • Beidseitig aufstellbare Kopfstützen bei der 1800 mm Pflegeliege ermöglichen einen individuellen Einsatz. Die leicht gerundete Auflagefläche bietet enormen Liegekomfort und unterstützt das Sicherheitsempfinden. • Durch den integrierten Gasdruckzylinder lässt sich die Pflegeliege kinderleicht an die Wand klappen. Das schafft Platz und erhöht den Wirkungskreis im Bad, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist. • Die Duschliege mit Elektromotor wird mit einer kabelgebundenen Fernbedienung geliefert. Die roten Betätigungsknöpfe zeigen deutlich nach „oben“ und „unten“ an. • Die kabelgebundene Fernbedienung wird mit einer praktischen Halterung zum Abringen an der Wand geliefert.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40CS Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Steuerkasten	SMPS14 Careline (Linak), IPX6



PRESSALIT®

Produkt	SCT 3000 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8582318299
Kabelgebundener Fernbedienung	HB3 (Linak), IPX6
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 390 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft platziert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Wetwipe Ethanol Disinfection 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetwipe Universal Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



PRESSALIT®

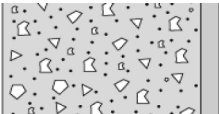
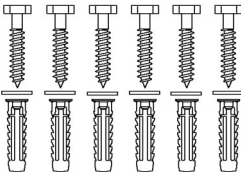
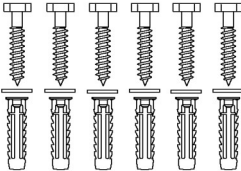
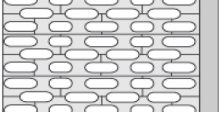
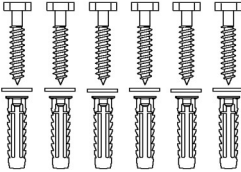
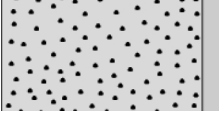
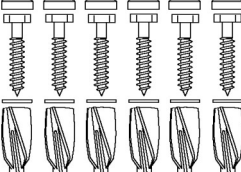
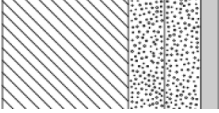
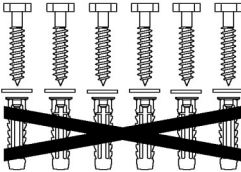
Produkt	SCT 3000 Duschiiege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8582318299
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - RoHS-Richlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

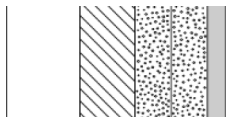
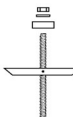
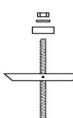
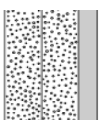
Produkt	SCT 3000 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8582318299

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SCT 3000 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar R8582318299		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®