




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT TL4 toiletløfter, manuel, til gulvafløb R9014112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	VVS:617989312 NRF:6191181 EAN:5708590372907 HMI: 138241  SELECT toiletløftere fås i flere modeller og farver til både vægafløb eller gulvafløb. De fås i elektrisk eller manuelt højdejusterbare versioner, med eller uden sideprofiler og til almindelige toiletter eller douchetoiletter. Alle udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring. SELECT TL4 toiletløfter, til gulvafløb. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L (kan omstilles til 2/4L). Manuelt højderegulerbar 200 mm med håndsvingsbetjening. Velegnet til douchetoilet eller douchetoiletsæde. Toiletter, toiletsæde og toiletstøtter skal bestilles separat. Materialer: Rustfrit stål og PMMA/ABS. Ekskl. monteringskrue til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulerbar 200 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandards. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
Materialer	Toiletløfteren er fremstillet i rustfrit stål, med afdækningskåbe i PMMA/ABS.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

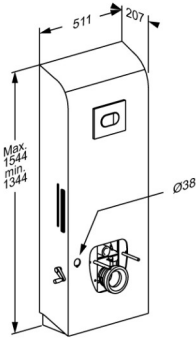

Produkt	SELECT TL4 toiletløfter, manuel, til gulvafløb
Varenummer	R9014112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF



PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL4 toiletløfter, manuel, til gulvafløb
Varenummer	R9014112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT TL4 toiletløfter, manuel, til gulvafløb R9014112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed.		

pressalit.com