



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SCT 2000 Duschliege, Leinwand, elektrisch höhenverstellbar R8581218000
Farbe Produkt- beschreibung	VVS: 777543720 EAN: 5708590376103 HMI: 140137 NBS: N13:40,375 Weiß Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. SCT 2000 Duschliege mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Hochklappbar. Inkl. Seitengitter und Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf. Außenmaß 910 mm x 1800 mm. Materialien: Lackierter Stahl, PVC-beschichtete Leinwand und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 700 mm



Produkt	SCT 2000 Duschliege, Leinwand, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8581218000
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 200 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 26 kg belastet. <i>Die Duschliege ist mit 500 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 21 mm/s
Geräusch	50 dB
Materialien	Lackierter Stahl, Leinwand (PVC-beschichtet für zusätzliche Haltbarkeit) und Polystyrol.
Ergonomie	Die Dusch- und Pflegeliege der Serie 2000 zeichnet sich durch eine sehr tiefe Verstellung bis Bodennähe aus, die dem Nutzer das Umsetzen erleichtert. Die Oberfläche der Pflegeliege besteht aus einer Netzbespannung für ein angenehmes Körpergefühl. Die flexible Höhenanpassung der Liege bietet Nutzern und Helfern den Vorteil, Ihren täglichen Aufgaben bequem und komfortabel nachzukommen.
Funktionen	Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. Die Duschliege kann an die Wand geklappt werden, sodass sie nur wenig Platz einnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. Kabelgebundene Fernbedienung: Die elektromotorische Höhenverstellung wird über die Fernbedienung gesteuert. Die Oberfläche vom Netzgewebe kann einfach gereinigt werden. Durch die Befestigung mit einem Reißverschluss kann diese abgenommen und separat gewaschen werden.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Careline, (Linak), 6000 N, IPX6
Steuerkasten	CB9 Careline, 24V mit erde, IPX6
Kabelgebundener Fernbedienung	HB3 (Linak), IP66
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 390 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft platziert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer.



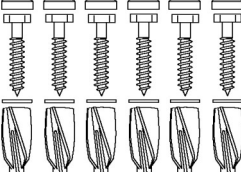
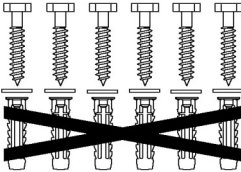
Produkt	SCT 2000 Duschliege, Leinwand, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8581218000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2000 Duschliege, Leinwand, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8581218000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	SCT 2000 Duschliege, Leinwand, elektrisch höhenverstellbar R8581218000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.