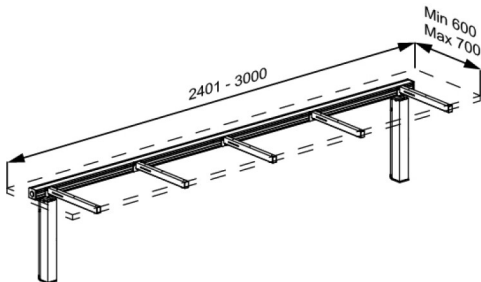




PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2401-3000 mm RK1414000
Färg	Vit
Beskrivning	EAN:5708590378848  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Finns för bänkskivor i alla längder mellan 600 och 3000 mm. INDIVO lyftenhet för bänkskiva, med två motorer och kontrollbox. Inkl. tvärprofil och fem konsoler. Höjddreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Till bänkskiva i längd 2401-3000 mm. Ange längd och djup på bänkskiva vid beställning. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjddreglerbar 300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 100 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva. Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Material	Pelare: Pulverlackerat stål Tvärprofil: Aluminium Konsoler: Pulverlackerat stål
Ergonomi	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.
Funktioner	Lyftenheter höjdjusteras antingen via strömbrytare i framkant eller med en manöverdosa.



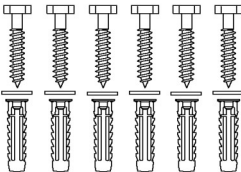
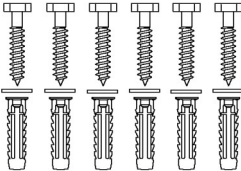
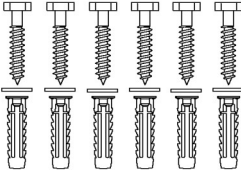
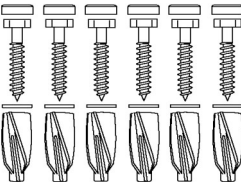
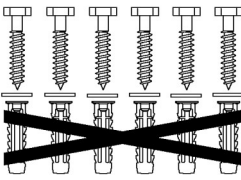
Product	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2401-3000 mm
Varunummer	RK1414000
Motor	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22
Kontrollbox	CBD6S (Linak) IP22
Manöverdosa	HB53 (Linak), IPX1
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	< Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklARATION	Detta produkt uppfyller de relevanta kraven i - Rådets direktiv 2011/65/EU om RoHS - Rådets direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet - Rådets direktiv 2014/35/EU om låg spänning



PRESSALIT®

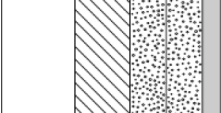
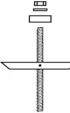
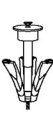
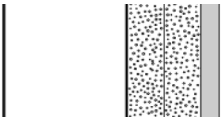
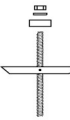
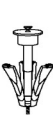
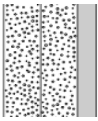
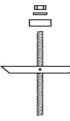
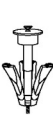
Product	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2401-3000 mm
Varunummer	RK1414000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2401-3000 mm RK1414000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®